

Guía de recogida y aplicación de la muestra de sangre capilar

Para conseguir un uso óptimo de la LumiraDx Platform es importante que las muestras de sangre capilar se recojan y apliquen correctamente a la Tira Reactiva LumiraDx. Este documento ofrece una guía adicional para la recogida y la aplicación de la muestra. Lea el manual del usuario de la Platform y el prospecto de las Tiras Reactivas antes de realizar tests por primera vez.

Las muestras se pueden aplicar directamente de una punción dactilar, o bien se puede utilizar un tubo capilar.

Recogida de una muestra de sangre capilar de una punción dactilar.

Utilice una lanceta cerca de la yema del dedo por el lado que mira hacia abajo.

Si es necesario, apriete ligeramente el dedo desde su base para producir una gota de sangre colgante del tamaño suficiente.



Lugar de la punción dactilar y tamaño mínimo de la gota de sangre colgante.




Área de aplicación de la muestra.

Aplicación de una muestra obtenida por punción dactilar a la Tira Reactiva

Deje que la gota de sangre colgante producida por la punción dactilar toque apenas el área de aplicación de la muestra de la Tira Reactiva.

Asegúrese de que la muestra se aplique centralmente y llene por completo el área de aplicación de la muestra en una gota limpia.

No deje que el dedo entre en contacto con la Tira Reactiva para evitar que la muestra se extienda demasiado.

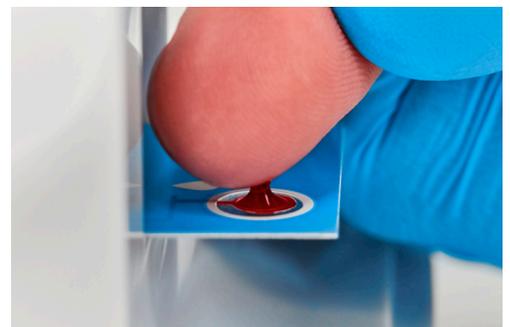

Aplicación de una muestra a la Tira Reactiva.

Recogida de una muestra de sangre capilar con un tubo capilar

Use una lanceta para obtener una gota de sangre en la punta del dedo.

Sostenga el tubo capilar horizontalmente, y toque con la punta la muestra de sangre. La muestra se introducirá automáticamente en el tubo por capilaridad.


- No apriete la ampolla del tubo capilar antes o durante la recogida de la muestra.
- No deje que el tubo capilar entre en contacto con el dedo.
- Asegúrese de que el tubo capilar se llene hasta la línea negra de llenado.
- Asegúrese de que no haya burbujas de aire en la muestra presente en el tubo capilar. Si hay presentes burbujas de aire, deseche el tubo capilar y la muestra, y vuelva a empezar.



Tubo capilar llenado horizontalmente utilizando una gota de sangre grande. El tubo debe llenarse hasta la línea negra para obtener un volumen de muestra suficiente.


Aplicación de una muestra de un tubo capilar a la Tira Reactiva

Sostenga el tubo capilar lleno verticalmente sobre el área de aplicación de la muestra de la Tira Reactiva y apriete la ampolla para dispensar la muestra.

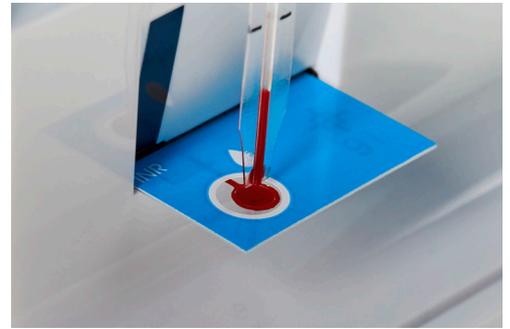


Sostenga el tubo capilar verticalmente para aplicar la muestra.

Ejemplos de muestra aplicada correctamente

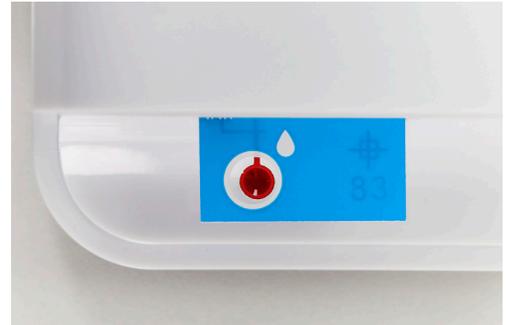

Muestra aplicada correctamente.

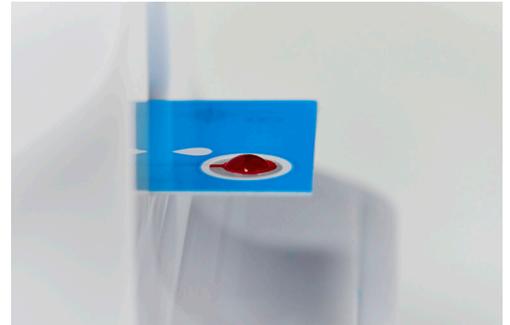

Muestra aplicada correctamente.

Ejemplos de muestra aplicada incorrectamente



Muestra aplicada incorrectamente.



Burbujas de aire en el área de aplicación de la muestra.

Para obtener asistencia técnica para el producto, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de LumiraDx.
Teléfono: **00800 5864 7239**
Correo electrónico: **customerservices@lumiradx.com**